

wir bewegen Ihr Leben
drive




bellavita
• Badlift

CE

GEBRUIKSAANWIJZING

NEDERLANDS

Inhoudsopgave

De badlift Bellavita – productbeschrijving	3
Indicatie	3
Voor uw veiligheid	4
Belangrijke informatie	4
Informatie over de accu, de acculader en de handbediening	4
Belangrijke veiligheidsregels	5
Informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	6
Installatie en gebruik	6
Uitpakken	6
Eerste montage in de badkuip	7
Bekleding aanbrengen / verwijderen	10
Aanbrengen van de hoofdsteun (optioneel)	11
De handbediening	12
Bediening bij het baden	13
Badlift uit de badkuip nemen	14
Onderhoud en reiniging	16
Onderhoud van de badlift	16
Reiniging	16
Reiniging van de bekleding	16
Montage van nieuwe noppen op de bekleding van de badlift	16
Onderhoud van de acculader	17
Opladen van de accu	17
Transport / Mobiel gebruik	18
Transport in onderdelen	18
Transport in vergrendelde toestand	18
Bijlage	19
Technische gegevens badlift Bellavita	19
Problemen oplossen	21
Informatie m.b.t. afvalverwerking	22
Hergebruik / verwerking	22
Garantiebepalingen	22
Toebehoren en reserveonderdelen	23
Verklaring van de symbolen	24
Typeplaatjes	24
Informatie m.b.t. de gebruiksaanwijzing	24
Alfabetisch zoekregister	25
Notities	26
Adressen	28

De badlift Bellavita – productbeschrijving

Hartelijk dank dat u gekozen heeft voor een kwaliteitsproduct van het merk Drive Medical. Met behulp van dit stabiele en kwalitatief hoogwaardige product kunt u van nu af aan weer zonder hulp comfortabel baden.

De badlift Bellavita voldoet aan de geldende normen DIN EN ISO 10535:2006 alsmede DIN EN 60601-1:1996.

De badlift Bellavita bestaat grotendeels uit hoogwaardig, recyclebaar licht kunststof. Hij is daarvoor gemakkelijk te vervoeren, eenvoudig op te bergen en daarom uitermate geschikt voor gebruik thuis, in een zorgcentrum of ook op reis.

De accu, een lithium-ion-accu, is in de handbediening geïntegreerd.

Dankzij de waterbestendige handbediening die in het water blijft drijven kan de badlift comfortabel vanuit de normale zitpositie worden bediend. De zitting kan tevens in een aantal tussenstanden worden gezet.

De aandrijfmotor en de besturingselektronica zijn waterdicht aangebracht. De badlift kan dus ook bij het douchen in de badkuip worden gebruikt.

De robuuste schaarconstructie maakt omhoog en omlaag bewegen mogelijk van 6,5 cm tot 48 cm hoogte. De hefstang zorgt er bij het bedienen van de omhoog/omlaag knoppen voor dat de zitting omhoog/omlaag beweegt.

De naar voren omklapbare, afneembare motor met geïntegreerde rugleuning wordt op de zitting vast geklikt en bij het omhoog bewegen automatisch vergrendeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de rugleuning per abuis omklapt.

Dankzij de geïntegreerde energiecontrolefunctie beweegt de lift alleen omlaag wanneer er nog voldoende energiec capaciteit is om de badlift volledig omhoog te bewegen.

Bij een gemiddeld gebruik (1 x dagelijks) verdient het aanbeveling het product na 5 jaar te vervangen (in afhankelijkheid van de algehele toestand van het product).

Indicatie

Badhulpmiddelen zijn producten die bedoeld zijn om de gebruiker in staat te stellen de dagelijkse lichaamsverzorging zelfstandig uit te voeren. Zij compenseren beperkingen of uitval van bepaalde lichaamsfuncties geheel of gedeeltelijk. De toepassing van dergelijke hulpmiddelen heeft als doel, zieke of mindervalide personen in staat te stellen op het gebied van lichaamshygiëne zo veel mogelijk onafhankelijk en zelfredzaam te zijn.

Badliften

Een badlift werkt als een stoel die in het bad wordt geplaatst en omhoog en omlaag kan bewegen: in de hoogste stand staat de zitting van de badlift even hoog als de rand van het bad. Het gebruik van een badlift komt in aanmerking, wanneer bij de gebruiker sprake is van ernstige functiebeperkingen/-stoornissen aan de bovenste en/of onderste ledematen, die een zelfstandig in- en uitstappen in resp. uit de badkuip of (recht)op gaan zitten onmogelijk maken en door middel van het gebruik van de badlift zelfstandig baden weer mogelijk wordt.



Voor uw veiligheid

► Let op!

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem de voorschriften altijd in acht, alleen dan kunt u zonder risico's met gebruik van de badlift baden!

► Belangrijke informatie

- De badlift mag niet worden gebruikt als ladder of trapje, in- of uitstaphulp buiten de badkuip, op- of afstaphulp, onderleghulp, hefbrug o.i.d. **Hij mag uitsluitend gebruikt worden door personen om in de badkuip te baden.**
- Kinderen en dieren altijd buiten bereik van de badlift houden.
- Neem bij storingen of beschadigingen a.u.b. meteen contact op met uw leverancier of vakhandel. Breng zelf geen wijzigingen aan de constructie aan. Reparaties mogen uitsluitend door een erkend installatiebedrijf of door de producent worden uitgevoerd. Bij niet in acht nemen van deze voorschriften vervalt de garantie.
- Hefstang uitsluitend bij vast geplaatste en rechtop staande rugleuning uit- of inschuiven!
- Het gebruik van hoogteadaptors is bij de badlift Bellavita niet toegestaan.
- Berg het product niet direct naast een warmtebron op.

► **Bewaar deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig!**

- Wanneer de badlift wordt vervoerd, moet de stekker van de handbediening eerst worden losgekoppeld.
- **Wanneer de lift gedurende langere tijd is blootgesteld aan lage temperaturen (bijv. opslag in de winter in een auto), moet hij ter voorkoming van schade voor het gebruik eerst weer op kamertemperatuur worden opgewarmd.**
- Let bij het gebruik van badolie of badzout op de aanbevolen dosering. Aan het badwater toegevoegde badolie of -zout kan een nadelige invloed hebben op het scharnierend vermogen van de hefconstructie.
- **Gebruik geen schoonmaakazijn om de badlift te reinigen!**

► Informatie over de accu, de acculader en de handbediening:

- Gebruik de handbediening alleen om de badlift te bedienen.
- De badlift mag alleen met een originele handbediening van Drive Medical worden bediend.
- Werp de handbediening nooit in open vuur en berg de handbediening niet in de nabijheid van open vuur of sterke warmtebronnen op.
- Maak de handbediening niet open. Door het openen van de handbediening vervalt de garantie.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde acculader om de accu van de handbediening op te laden.
- Gebruik de handbediening niet (meer), indien de behuizing van de handbediening is beschadigd.
- De acculader mag alleen buiten de badkamer in een droge ruimte worden gebruikt. De acculader mag uitsluitend worden gebruikt om de meegeleverde accu op te laden.

- **De accu moet voor het eerste gebruik van de badlift worden opgeladen en vervolgens na ieder gebruik van de badlift worden opgeladen! Laad de accu indien u deze langere tijd niet gebruikt om de 3 maanden op, dit verlengt de levensduur van de accu.**

- Steek geen voorwerpen die geleiden (b.v. breinaald, metalen pen etc.) in de stekkerbus van de handbediening.

- Trek voordat u de acculader reinigt altijd de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de acculader uitsluitend met een droge doek.

- Hoewel de badlift, de acculader en de accu stevige constructies zijn, verdient het aanbeveling deze niet te laten vallen. Bij aan de buitenkant zichtbare en/of hoorbare beschadiging mag de badlift niet worden gebruikt. Neem in dat geval contact op met uw vakhandelaar. Wij adviseren u het adres van uw vakhandelaar aan het einde van deze gebruiksaanwijzing in te vullen.

- Voor meer informatie, technische gegevens en adressen verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing.

- Lees in geval van storing eerst in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing het hoofdstuk "Problemen oplossen" door. Neem altijd de daar beschreven informatie en instructies in acht. Gebruik in het belang van uw eigen veiligheid de badlift niet totdat de storing is verholpen.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- a) Ga altijd in het midden van de lift zitten, met de rug tegen de rugleuning, strek de benen licht naar voren en leg uw vrije hand op de badrand of in uw schoot. Met de andere hand bedient u de lift omhoog en omlaag.

- b) Steek tijdens het omhoog of omlaag bewegen niet uw hand tussen de badrand en de lift of onder de zitting, dit kan letsel veroorzaken.

- c) Personen met een zware lichamelijke handicap of geestelijke handicap mogen nooit zonder toezicht baden.

Ga alleen zelfstandig in bad, indien uw lichamelijke gesteldheid dit toelaat. Gaat u anders alleen onder toezicht in bad.

- d) Voer voor het gebruik van de badlift altijd een test uit (omhoog en omlaag bewegen met stop en controle van de NOOD-UIT functie).

- e) Gebruik de badlift niet verder na een storing, maar laat deze repareren door een vakhandelaar.

- f) Neem geen voorwerpen (b.v. borstels etc.) mee het bad in!

Voor uw veiligheid

Informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Dit product voldoet aan de veiligheidseisen die in de Richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC, IEC 60601-1-2) (89/336/EEG) worden genoemd. Het kan echter niet volledig worden uitgesloten dat onder bepaalde voorwaarden een onderlinge storing, met name bij het gebruik van mobiele telefoons, bij elektrische apparaten

optreedt. Maak daarom in de nabijheid van de badlift geen gebruik van levensbehoudende, levensondersteunende medische apparatuur of apparatuur die de gebruiker in gevaar brengt zodra hieraan een storing optreedt. Deze kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gestoord of het correct gebruik van de badlift beïnvloeden. Mocht u storingen of een ongebruikelijk functioneren van de badlift in de nabijheid van elektrische apparatuur die in gebruik is, opmerken, gebruik dan de badlift niet meer en neem contact op met uw vakhandelaar.

Montage en gebruik

Uitpakken

Bij levering moet de doos de volgende onderdelen bevatten:

1. motor met geïntegreerde rugleuning en handbediening (met geïntegreerde accu);
2. zitting met zijflappen;
3. acculader;
4. gebruiksaanwijzing;
5. 4 x zuignappen diameter 75 mm t.b.v. montage op de bodemplaat.


Mocht een van de genoemde onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar.

Pak eerst de acculader en dan alle andere onderdelen uit. De doos kan worden gebruikt om de badlift op te bergen en te vervoeren.

Voor het eerste gebruik moet de accu altijd worden opgeladen.

Neem hiervoor de instructies in het hoofdstuk “Opladen van de accu” in acht.

Eerste montage in de badkuip

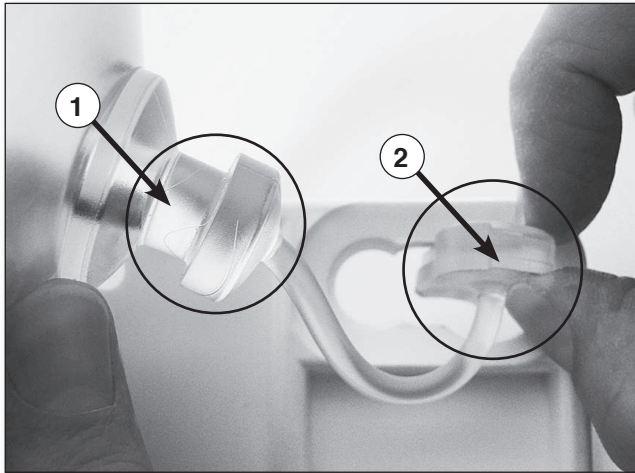


① *Kop van de zuignap* · ② *Afsluitstop*

1) Steek de achterste zuignappen eerst met de beweegbare afsluitstop naar voren in de onderkant van de bodemplaat.



3) Druk de afsluitstop van boven geheel in de opening van de bodemplaat, zodat hij er niet meer uitsteekt.

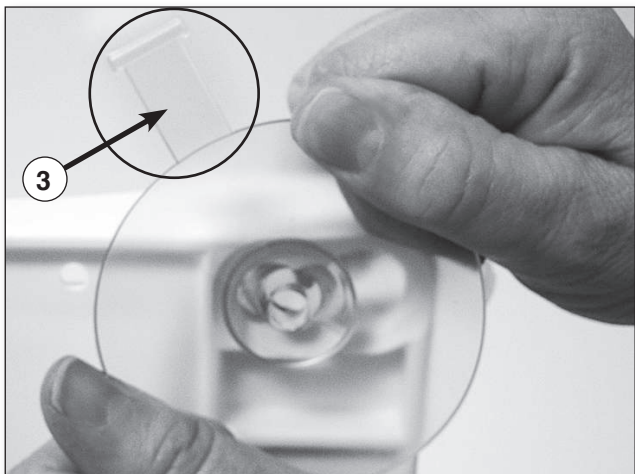

③ *Demonteerlipje*

2) Schuif de kop van de zuignap naar de kleine opening toe door lichtjes te draaien in zijn eindpositie. Let er daarbij op dat de demonteerlipjes naar achteren steken.



4) Steek de voorste zuignappen op dezelfde manier erin, druk hierbij tevens de demonteerlipjes in de uitsparingen van de bodemplaat. Hierdoor worden de voorste zuignappen bij het verwijderen automatisch met lucht gevuld.


Montage en gebruik

De badlift wordt door middel van de zuignappen aan de bodem van het bad gefixeerd. De zuignappen aan de onderzijde van de badlift moeten daarom schoon en droog zijn, wanneer de badlift in de eveneens schone en droge badkuip wordt geplaatst. Wij adviseren zuignappen en badkuip regelmatig met een gangbaar reinigingsmiddel schoon te maken om ervoor te zorgen dat de zuignappen goed vast blijven zitten.

1. Controleer eerst of de bodem van de lege badkuip schoon is en er geen antislip matjes in het bad liggen.
2. Plaats de zitting met de aan de bodemplaat gemonteerde zuignappen zodanig in de lege badkuip, dat de achterste zuignappen zich aan het begin van de schuine kant van de badkuip bevinden.
3. Plaats vervolgens de motor met geïntegreerde rugleuning zoals op de afbeelding is afgebeeld met de vergrendelingen in de houders van de zitting.




➤ **Let op! Zorg ervoor dat beide vergrendelingen in de houders worden geplaatst.**

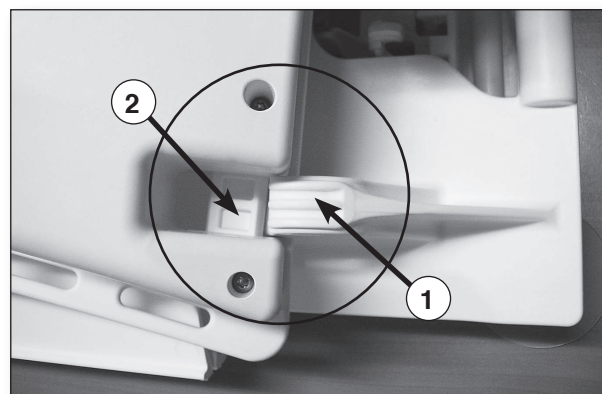

① Houder · ② Vergrendeling

4. Nu met de andere hand de rugleuning aan de handgrepen naar boven draaien (afbeelding) en zover naar achteren bewegen, totdat de motor aan de aanslag van de bodemplaat ligt.

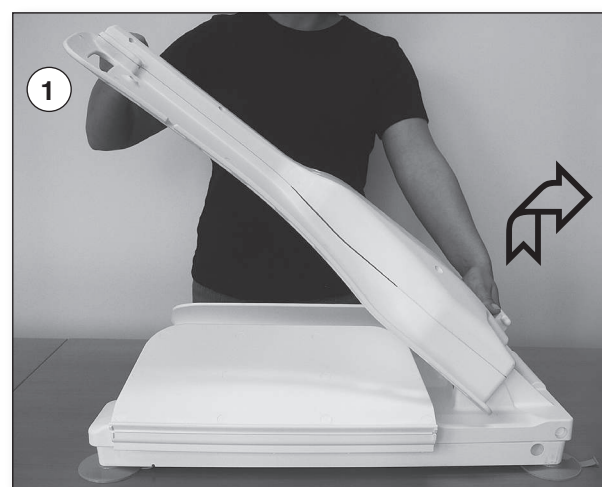


① Handgreep




5. De handbediening op de badlift aansluiten. Steek de stekkerbus aan de spiraalkabel van de handbediening op de stekkerverbinding, totdat de vergrendeling voelbaar vast klikt en de rode ring aan de stekker niet meer zichtbaar is. De badlift is nu klaar voor gebruik.


➤ **Opmerking:** Indien de badkuip aan de kant van de rugleuning verticaal verloopt en de rugleuning dus tegen de badkuip kan stoten, moet de lift buiten de badkuip worden opgesteld, in de bovenste positie worden gezet, en vervolgens in de badkuip worden geplaatst. Bij het baden kan de hoek van de rugleuning dan niet meer worden ingesteld, omdat de afstand tussen rugleuning en badkuip te klein is.

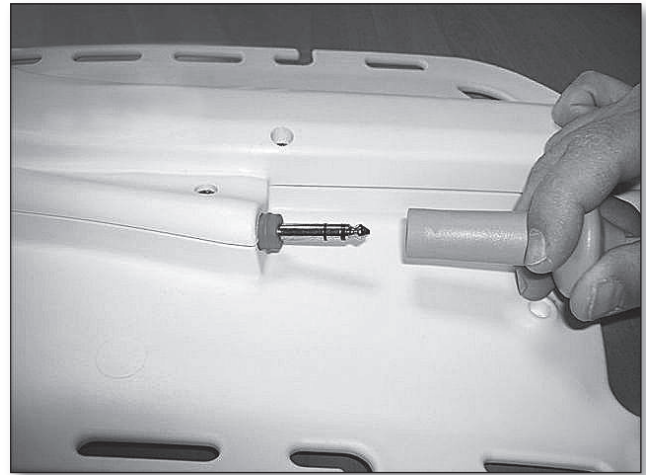

6. Let op dat de hefstang op de juiste manier in de uitsparing is geplaatst.

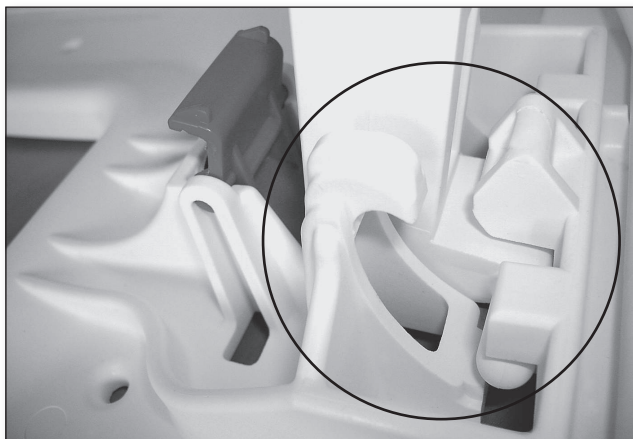

Goed

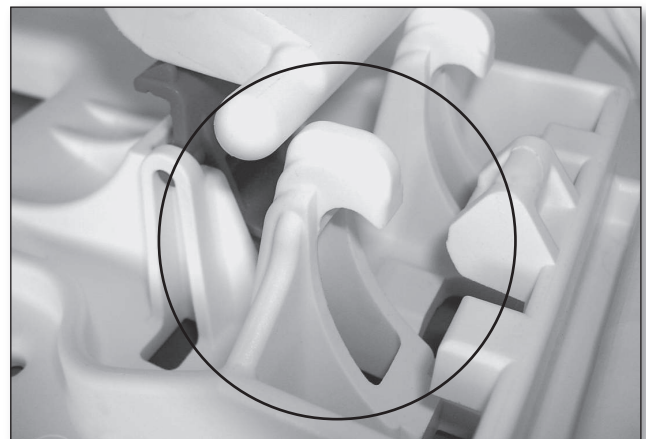

Fout

Montage en gebruik

Bekleding aanbrengen / verwijderen

De bekleding kan gemakkelijk worden aangebracht en verwijderd.

- Om de bekleding te bevestigen de bekleding met de goede kant naar boven op de rugleuning resp. zitting leggen en de bevestigingsknoopjes

geheel in de hiervoor bestemde gaten van de rugleuning resp. de zitting en zijflappen duwen (afbeelding).




Bekleding rugleuning



Bekleding rugleuning



Bekleding zitting

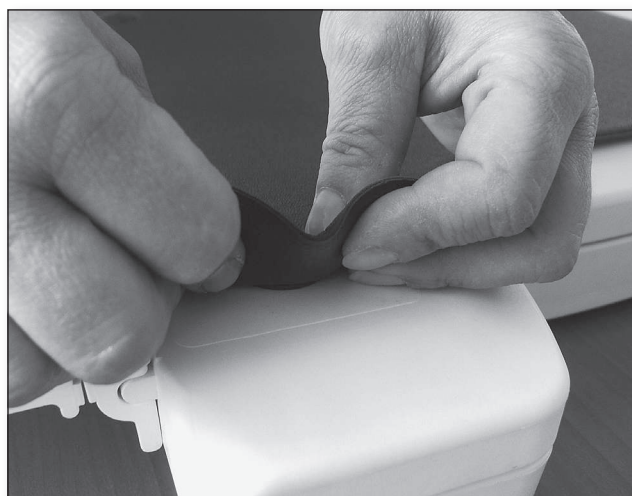



Bekleding zitting

- Om de bekleding te verwijderen de twee bevestigingsknoopjes van onderen met twee vingers uit de gaten trekken.

De badlift kan ook zonder bekleding worden gebruikt.

■ Aanbrengen van de hoofdsteun (optioneel)

Steek de beide pennen van de hoofdsteun in de openingen van de motor. De gewenste hoogte kan traploos worden ingesteld.

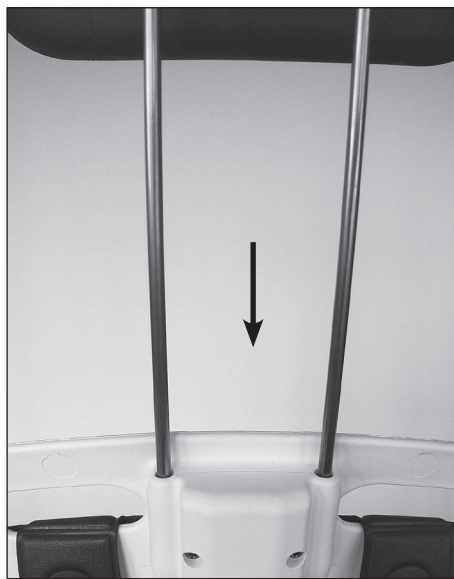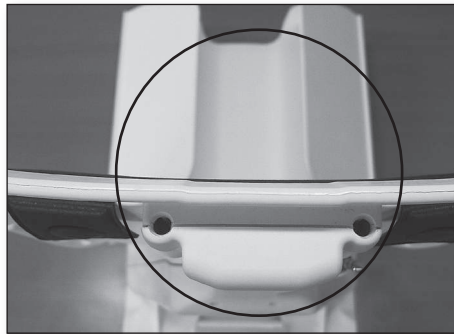

Montage en gebruik

De handbediening

Het vermogen van de volle accu is afhankelijk van het gewicht van de gebruiker voldoende voor maximaal zes keer baden. Tijdens het baden licht het controlelampje van de handbediening groen op.

Wanneer de laadtoestand van de accu onder een bepaalde door de producent ingestelde waarde komt, verandert de kleur van het controlelampje naar geel en gaat het langzaam knipperen. Dit betekent dat het vermogen van de accu nog voor ca. 1 keer baden voldoende is. Daarna verdient het aanbeveling de accu volgens de gebruiksaanwijzing op te laden.

Indien de badlift tijdens de gele fase van de accu wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de kleur van het controlelampje van geel naar snel knipperend rood verandert. De badlift beweegt dan alleen nog omhoog, zodat de gebruiker altijd veilig uit het bad kan komen. De accu moet nu onmiddellijk met de meegeleverde acculader en volgens de gebruiksaanwijzing worden opgeladen.

GROEN lampje: lift klaar voor gebruik.

GEEL lampje: lift beperkt gebruiken, nog slechts 1 keer baden. Accu moet binnenkort worden opgeladen.


ROOD lampje: lift niet meer gebruiken, beweegt alleen nog omhoog. Accu moet onmiddellijk worden opgeladen.

• NOOD-UIT knop (rood):

In geval van nood drukt u op de rode NOOD-UIT knop: de badlift komt dan meteen tot stilstand. Om de badlift weer aan te zetten drukt u op de groene knop AAN.

De badlift schakelt zichzelf na ca. 30 minuten automatisch uit. Wanneer u de badlift zelf wilt uitschakelen, drukt u op de rode knop van de handbediening (controlelampje gaat uit).

- ① *Knop OMLAAG (blauw)*
- ② *NOOD-UIT knop (rood)*
- ③ *Controlelampje (led)*
- ④ *Knop OMHOOG (geel)*
- ⑤ *Knop AAN (groen)*

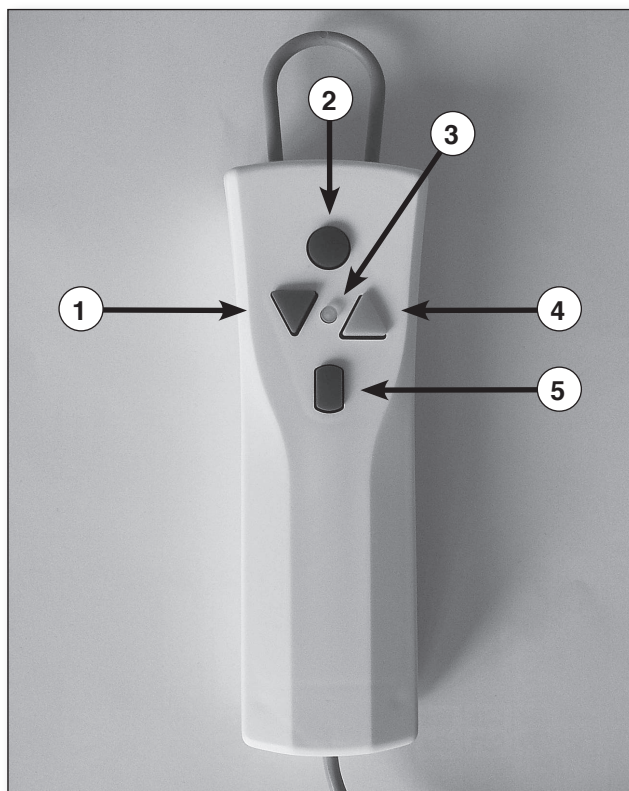

Bediening bij het baden



1. Controleer voor gebruik van de badlift of de handbediening door middel van de stekerverbinding goed op de badlift is aangesloten. Dat is het geval wanneer de rode ring op de stekerverbinding niet meer zichtbaar is. Druk op de knop AAN (groen) van de handbediening. Het controlelampje licht nu groen op.
2. Druk nu op de knop OMHOOG (geel). De rugleuning zwenkt eerst in de rechte positie. Vervolgens beweegt de lift tot aan de eindstand omhoog en schakelt automatisch uit. Als u de knop los laat stopt de lift, zodat ook tussenposities mogelijk zijn.
3. Zijflappen uitvouwen totdat deze op de badrand liggen. Stop zodra de lift de bovenkant van het bad heeft bereikt: de zitplaat bevindt zich nu ter hoogte van de badrand en de zijflappen overbruggen het gat tussen zitting en badrand.

➤ **Belangrijk: de zijflappen moeten in een rechte lijn op de badrand liggen.**

4. Verplaats nu de persoon over op de zitting van de badlift.

5. Om de badlift omlaag te bewegen drukt u op de knop OMLAAG (blauw). De lift beweegt eerst tot aan de eindstand omlaag. Vervolgens zwenkt de rugleuning automatisch naar achteren. In de eindpositie schakelt de motor automatisch uit. Als u de knop los laat stopt de lift, zodat ook tussenposities mogelijk zijn.

➤ **Let op! Laat de blauwe knop meteen los als de rugleuning van de badlift tegen de badkuip stoot.**

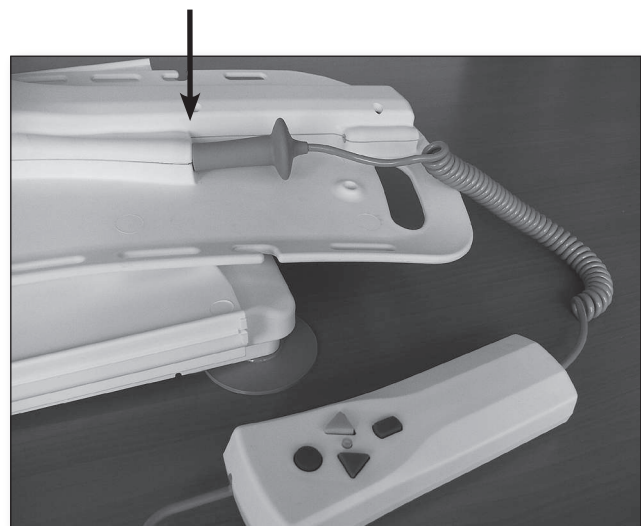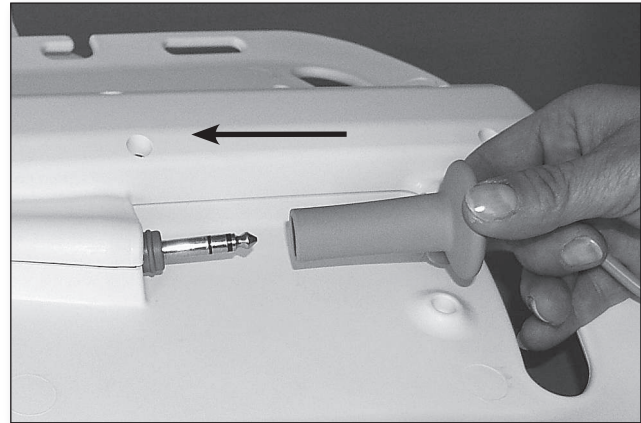

Montage en gebruik

6. Als u klaar bent met baden, drukt op de knop OMHOOG (geel) van de handbediening om de lift weer in de maximale hoogste stand te bewegen.

Zorg ervoor dat de zijflappen niet achter eventueel aanwezige handgrepen in de badkuip blijven steken.

7. Verplaats de persoon zijdelings uit de badkuip over.

De badlift schakelt zichzelf na ca. 30 minuten automatisch uit. Wanneer u de badlift zelf wilt uitschakelen, drukt u op de rode knop van de handbediening (controlelampje gaat uit).

➤ Opmerkingen

Leun bij het omlaag en omhoog bewegen van de lift ontspannen tegen de rugleuning en leg uw handen op uw schoot.

Indien de lift in de badkuip blijft staan, moet u de handbediening met de ingebouwde accu van de badlift loskoppelen. Dit voorkomt dat de accu onopzettelijk wordt ontladen.

▫ Badlift uit de badkuip nemen

Laat de badlift met behulp van de handbediening eerst volledig omlaag bewegen en de rugleuning volledig naar achteren zwenken, totdat de motor in de eindstand vanzelf stopt. Let er daarbij op dat de rugleuning niet tegen het bad aanstoot. Koppel vervolgens de handbediening los.

1. Klap de zijflappen naar binnen op de zitting.
2. Klap de motor naar beneden op de zitting. Houd daarbij de motor aan de handgrepen vast.



3. Zorg ervoor dat de hefstang volledig is teruggeschoven.



Goed



Fout

4. Het motorgedeelte kan nu in de richting van de pijl (zie afbeelding) van het zitgedeelte worden losgehaald.

➤ **Opmerking:** De motor kan uitsluitend in een bepaalde hoek van het zitgedeelte worden losgemaakt. In een volledig naar voren geklapte toestand kan de motor niet meer van de zitting worden losgehaald, omdat hij in deze positie weer vergrendeld is. Zet de rugleuning in een hoek zoals weergegeven op de afbeelding en neem vervolgens de motor in de richting van de pijl van de zitting.



5. Maak de beide achterste zuignappen aan de bodemplaat los door aan de lipjes te trekken. Til vervolgens de bodemplaat aan de achterkant op, hierdoor worden de voorste zuignappen automatisch van lucht voorzien en laten deze los. Neem nu de zitting uit de badkuip.

Onderhoud en reiniging

Onderhoud van de badlift

De badlift is voorzien van onderhoudsvrije lagers en loopoppervlakken. Hij hoeft dus niet te worden gesmeerd.

Ten minste om de 6 maanden moet de badlift volledig worden gecontroleerd. De controle omvat een visuele controle, met name van de dragende onderdelen en de veiligheidsvoorzieningen, alsmede alle vereiste controles met betrekking tot het goed functioneren van de badlift. Indien hierbij gebreken, slijtage of andere schade wordt herkend, die een risico vormen voor de veiligheid van de lift, moet de badlift buiten bedrijf worden genomen en de gebreken worden hersteld.

Reparaties moeten door hiervoor geschikte en vakbekwame personen worden uitgevoerd, die op grond van hun opleiding, kennis en op basis van hun praktische ervaringen dergelijke reparaties correct kunnen uitvoeren.

Laat reparaties uitsluitend door een erkend (installatie-)bedrijf uitvoeren.

➤ **Let op: De handbediening mag uitsluitend door de producent van de badlift worden geopend!**

Reiniging

De lift moet meteen na gebruik worden gereinigd (bij voorkeur met heet water afspoelen) om de badlift in een deugdelijke staat te houden.

Spoel de badlift nadat hij is gebruikt altijd grondig af. Gebruik voor het reinigen van de badlift (zonder bekleding) a.u.b. gangbare reinigingsmiddelen zonder schuurmiddel en gangbare ontsmettingsmiddelen.

Reiniging van de bekleding

Het materiaal van de afneembare bekleding is door het gladde oppervlak en de antibacteriële eigenschappen hygiënisch.


Was de bekleding regelmatig in de handwas of in de wasmachine bij 60° C. Gebruik een niet biologisch wasmiddel zonder enzymen. Bij gebruik van badolie kan de bekleding verkleuren. Indien de bekleding niet regelmatig wordt gereinigd, kan dit eveneens tot verkleuren van de bekleding leiden.

➤ **Opmerking: Het verkleuren van de bekleding valt niet onder de garantie, omdat dit wordt beschouwd als normale slijtage.**

- De bekleding kan t.b.v. de reiniging heel eenvoudig worden verwijderd.
- De bekleding niet in de wasdroger drogen, maar ophangen en aan de lucht laten drogen.
- Wij adviseren u ter aanvulling een gangbaar ontsmettingsmiddel te gebruiken.
- Let op de informatie van de producent!

Montage van nieuwe noppen op de bekleding van de badlift

Steek de nieuwe noppen eerst aan de bovenkant door het gat in de bekleding en druk vervolgens aan de onderkant het schijfje ter versterking erop.

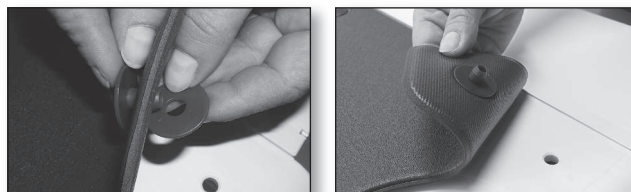

► Onderhoud van de acculader

De acculader is onderhoudsvrij. Reinig de behuizing van de acculader uitsluitend met een mild reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een zachte vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen vocht in de acculader binnendringt. Zorg ervoor dat de acculader weer helemaal droog is voordat u deze weer gebruikt. Laat de acculader eventueel op een droge, goed geventileerde plek enkele uren zonder stroomtoevoer liggen.

► Let op!

Haal de netstekker van de acculader uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt.

► Accu opladen

Laad de accu voor ieder gebruik volledig op.

De spanning op de acculader moet overeenstemmen met de spanning van uw stroomnet.

1. Steek de stekerverbinding van de acculader zover in de stekkerbus aan de spiraalkabel van de handbediening, totdat de stekerverbinding vast klikt.
2. Steek de netstekker van de acculader in een stopcontact.
Het rode controlelampje op de handbediening licht zolang op, totdat de accu is geladen. Daarna licht het controlelampje groen op. Laat de accu nog verder aangesloten op de acculader, wanneer de accu volledig moet worden geladen. De besturing van de acculader stopt na ca. 4 uur het laadproces. Dit voorkomt dat de accu wordt overladen.
3. Trek de netstekker van de acculader uit het stopcontact.
4. Trek de stekerverbinding van de acculader uit de stekkerbus op de handbediening.



► Belangrijke informatie

- Mocht het controlelampje na het aansluiten van de handbediening niet oplichten, controleer dan a.u.b. het volgende:
 - **de aansluiting** (stekerverbinding volledig in de bus gestoken)
- Gebruik de acculader alleen in een gesloten ruimte. Stel de acculader niet bloot aan water en vocht.

Gebruik de acculader nooit in de badkamer.

► Opmerking:

- Mocht de acculader beschadigd raken, stuur hem dan a.u.b. naar de leverancier ter controle.

Transport / mobiel gebruik

Bij **mobiel gebruik** moet u tevens op de volgende punten letten:

1. De handbediening van de badlift moet losgekoppeld en apart worden vervoerd.
2. Zorg ervoor dat de badlift bij het vervoeren (bijv. in de auto) goed tegen verschuiven is geborgd.
3. Indien de in de handbediening geïntegreerde accu aan lage temperaturen wordt blootgesteld (b.v. in de winter bij opslag in de auto), laat dan de accu eerst weer op kamertemperatuur komen en laad hem eventueel op.
4. Let op bij het optillen: de zitting weegt ca. 5,5 kg en de motor (zonder handbediening) ca. 3,8 kg.

Transport in onderdelen

Zitting en motor kunnen aan de beide handgrepen eenvoudig worden gedragen.



Transport in vergrendelde toestand

De badlift kan ook als één geheel worden vervoerd.



Technische gegevens badlift Bellavita

Lengte totaal (bij rugleuning in stand omlaag)	ca. 830 mm
Breedte totaal (zitplaat incl. zijflappen)	ca. 700 mm
Zitbreedte	ca. 350 mm
Zitdiepte	ca. 420 mm
Zitplaat totale lengte	ca. 570 mm
Zithoogte min.	ca. 65 mm
Zithoogte max.	ca. 480 mm
Hoogte rugleuning	ca. 640 mm
Breedte rugleuning	ca. 320 – 360 mm
Rugleuning verstelbaar	van 10° – max. 50°
Bodemplaat breedte	ca. 310 mm
Bodemplaat lengte	ca. 560 mm
Belasting max.	140 kg
Totaal gewicht, zonder handbediening	ca. 9,3 kg
Totaal gewicht, incl. handbediening	ca. 9,7 kg
Gewicht handbediening incl. accu	ca. 0,4 kg
Gewicht motor	ca. 3,8 kg
Gewicht zitting	ca. 5,5 kg
Duur omhoog/omlaag beweging telkens	ca. 50 seconden onder belasting
Aantal keren baden met controlelampje groen (= accu vol), bij 100 kg lichaamsgewicht	7 cycli
Bedrijfspanning	12 V 
Accu (lithium-ion)	12 V / 1,3 Ah herlaadbaar (zie opschrift op behuizing)
Automatische uitschakeling	30 minuten max.
Verbruik	90 W bij max. 12 V
 Type toepassingsonderdeel (B)	
Veiligheidsklasse	IP X7
Benodigde kracht t.b.v. bediening van de knoppen van de handbediening	3 N




Algemeen

- Omgevingsvoorwaarden tijdens bedrijf:

temperatuur	+ 10° C + 50° C
relatieve luchtvochtigheid	10 100%
luchtdruk	700 hPa 1060 hPa
- Omgevingsvoorwaarden tijdens vervoer en opslag:

temperatuur	– 10° C + 40° C
relatieve luchtvochtigheid	10 100%
luchtdruk	700 hPa 1060 hPa
Geluidsniveau:	54 dB A

Bijlage

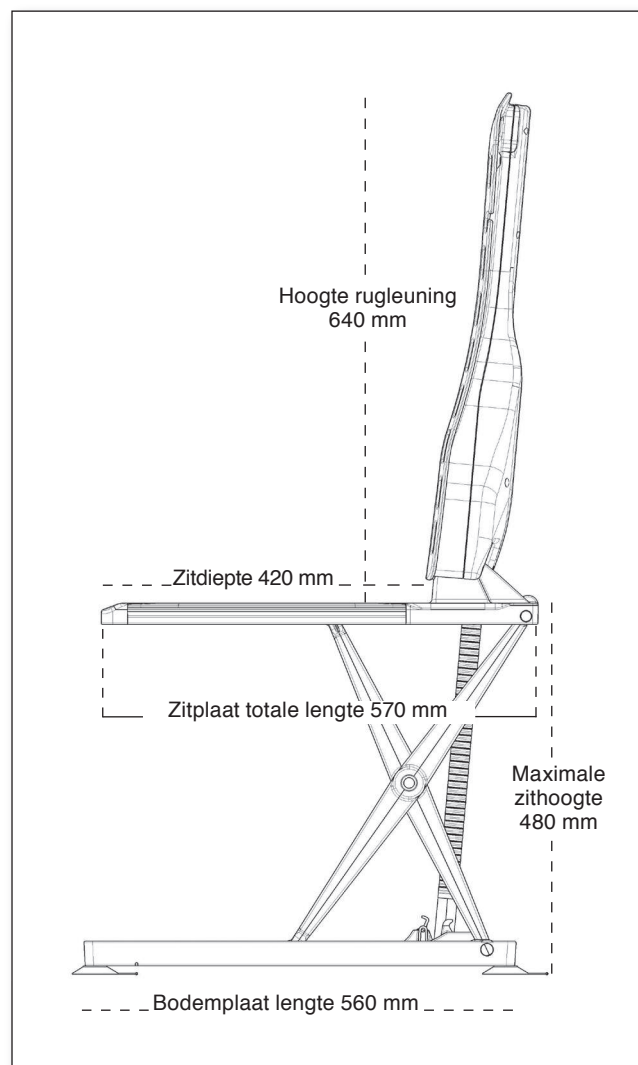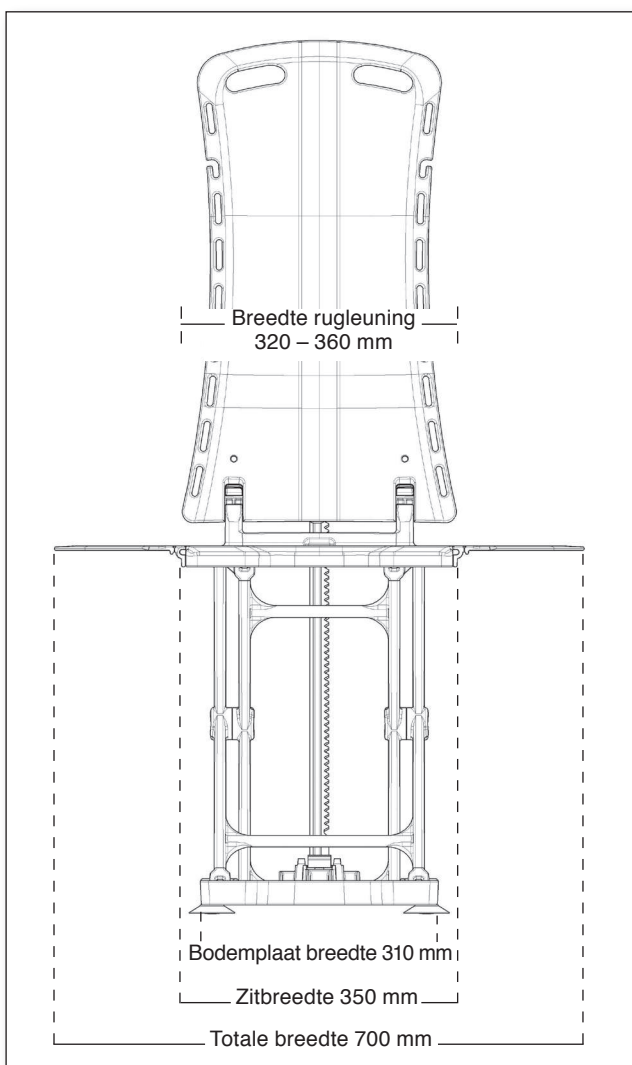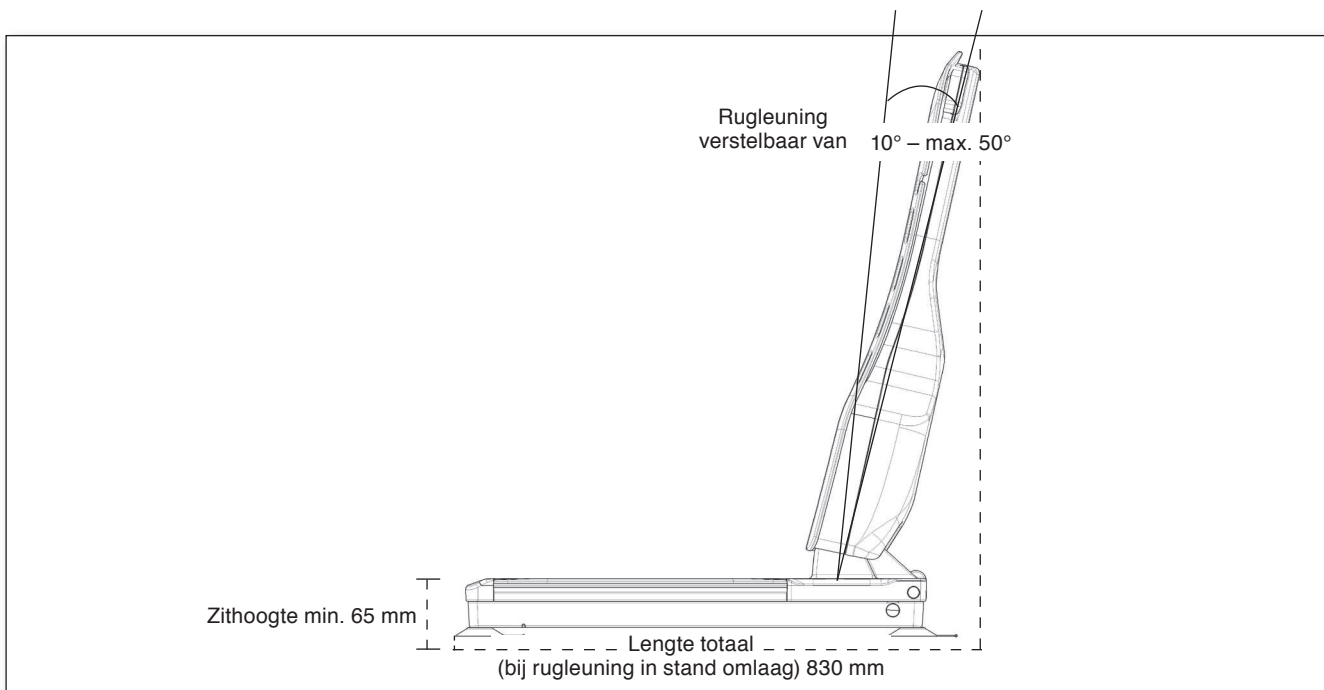

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
<i>Badlift werkt/beweegt niet</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Accu is leeg • Contacten aan handbediening verontreinigd • Handbediening is niet goed aangesloten 	<ul style="list-style-type: none"> – Accu opladen – Handbediening loskoppelen, contacten met droge doek afwrijven en handbediening weer aansluiten – Stekkerverbinding controleren
<i>Lift stopt telkens</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Accu is leeg • Heflast te hoog 	<ul style="list-style-type: none"> – Accu opladen – Heflast verminderen (max. belasting aanhouden, zie typeplaatje op badlift)
<i>Accu laadt niet op</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Geen stroomtoevoer naar acculader • Contacten verontreinigd 	<ul style="list-style-type: none"> – Acculader aan stroomnet aansluiten – Contacten met droge doek afwrijven

► Belangrijke informatie m.b.t. oplossen van problemen!

Mocht ondanks het opvolgen van de hierboven beschreven instructies de badlift niet werken, neem dan a.u.b. contact op met de leverancier waar u het apparaat hebt gekocht.

Informatie m.b.t. afvalverwerking

Oude apparaten en verpakkingen dienen volgens de geldende wettelijke voorschriften m.b.t. afvalverwijdering en verwerking te worden ingeleverd.

Apparaten die onder de Duitse Wet inzake elektrische en elektronische apparatuur (“Elektro- und Elektronikgerätegesetz”) vallen, zijn bij de stichting “Elektro-Altgeräte-Register” (Register afgedankte elektrische apparatuur) als medische producten voor de professionele B2B-gebruiker in de lijst opgenomen.

Ons registratienummer is: DE 33275322

Hergebruik / verwerking

Dit product is bedoeld voor hergebruik. Het aantal keren van hergebruik is afhankelijk van de desbetreffende staat waarin het product zich bevindt.

Bij de verwerking dient de informatie van de producent in acht te worden genomen: deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Garantiebepalingen

Drive Medical verleent op dit product drie jaar garantie, en 2 jaar op de accu. Op de bekleding en de zuignappen wordt geen garantie verleend (aantoonbaar d.m.v. factuur, leveringsbon of stempel met datum van de leverancier).

Schade als gevolg van normale slijtage of onjuist gebruik valt niet onder de garantie.

Indien het product tijdens de garantieperiode als gevolg van een aantoonbare materiaal- of productiefout gebreken vertoont, wordt deze gratis gerepareerd of vervangen door een intact product.

De garantie vervalt indien er zonder uitdrukkelijke toestemming wijzigingen aan het apparaat zijn toegebracht.

Reclamaties worden alleen in behandeling genomen, wanneer het apparaat compleet en niet gedemonteerd aan de leverancier wordt teruggestuurd. Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten, voor zover dit niet in strijd is met dwingende nationale voorschriften. Met name zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade door gebreken, voor verlies of kosten in verband met het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van het apparaat voor enig doel.

Stilzwijgende toezeggingen ten aanzien van het gebruik of de geschiktheid voor een bepaald doel worden uitdrukkelijk uitgesloten.

▮ Toebehoren en reserveonderdelen

In de volgende lijst staan de bestelnummers voor originele toebehoren en originele reserveonderdelen vermeld.

Artikel	Bestelnummer
• Bekleding voor zitting en rugleuning	
Bekledingset Classic, wit	460800252
Bekledingset Classic, blauw	460800312
Bekledingset Comfort, wit	460900252
Bekledingset Comfort, blauw	460900312
• Reserveonderdelen	
Acculader Bellavita EU , model: HK-J206-A138 PRI.: 100-240V 50/60Hz 0.2A; SEC.: 13.8V 0-0.4A	460900401
Acculader Bellavita UK , model: HK-J306-A138 PRI.: 100-240V 50/60Hz 0.2A; SEC.: 13.8V 0-0.4A	460900402
Acculader Bellavita US , model: HK-J106-A138 PRI.: 100-240V 50/60Hz 0.2A; SEC.: 13.8V 0-0.4A	460900403
Stop + schijf t.b.v. bekleding Classic & Comfort (1 st.), wit	415252
Stop + schijf t.b.v. bekleding Classic & Comfort (1 st.), blauw	415312
Zuignap Ø 75 mm, incl. lipje, transparant	460900224
Zuignappenset (4 x Ø 75 mm, incl. lipje, transparant)	460900225
Handbediening incl. accu	460900600
• Toebehoren	
Hoofdsteun, bekleed, wit	410200252
Hoofdsteun, bekleed, blauw	410200312
Draai- en transferhulpmiddel VITATURN L	412100200
Draaihulpmiddel VITATURN K	412100100
Zijflappenafwijzer set (2 st.)	400570




Hoofdsteun



Zijflappenafwijzer




Vitatum K

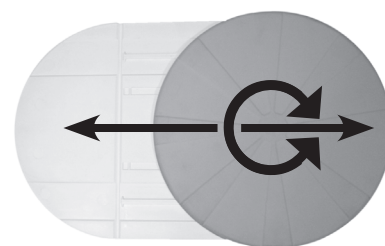

Vitatum L


Bijlage

Verklaring van de symbolen

 CE-markering: dit product voldoet aan de wezenlijke eisen van EG-Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG.


 Gelijkstroom

 Belangrijke informatie


 De Bellavita badlift hoort niet bij het ongesorteerde huisvuil: lever de afgedankte badlift daarom a.u.b. in bij een van de inzamelpunten conform de Europese richtlijn 2002/96/EG.

Typeplaatjes

Op de badlift zijn twee typeplaatjes aangebracht, nl. op het zitgedeelte en op de motor. Het typeplaatje van het zitgedeelte bevindt zich onder de zitting, dat van de motor bevindt zich op de achterzijde. Behalve algemene technische informatie bevindt zich op het typeplaatje van de badlift twee gegevens, die voor onderhoud, reparaties en in het geval van garantieclaims belangrijk zijn:

 (WW/YY) Productieweek en -jaar van de badlift

SN Serienummer van de badlift

 Type toepassingsonderdeel (B)

Informatie m.b.t. de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid van afbeeldingen, tekeningen, technische gegevens en elektrische waarden kan niet worden gegarandeerd. Evenzeer zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten.

Nadruk van deze gebruiksaanwijzing is uitsluitend toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming.

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Alfabetisch zoekregister

AAN-knop	13	Mobiel gebruik	18
Accu	4, 9, 17	Montage.....	6, 7
Acculader.....	4, 17	Omlaag.....	5
Accu opslag.....	18	Omhoog.....	5
Adressen	28	Omlaag bewegen van de badlift.....	13
Afvalverwerking	22	Onderhoud	16
Baden	13, 14	Onderhoud van de acculader	17
Baden van personen	4	Onderhoudsvrije lagers	16
Badrand.....	5, 13	Ontsmettingsmiddel.....	16
Bekleding.....	10	Opbergen	6
Bijlage.....	19	Opladen van de accu	17
Blauwe knop	13	Plaatsing in de badkuip	7
Demonteerlipjes.....	15	Problemen oplossen.....	21
Draai- en transferhulpmiddel	23	Problemen oplossen, Belangrijke informatie ..	21
Draaihulpmiddel.....	23	Productbeschrijving	3
Elektromagnetische compatibiliteit	5	Reiniging.....	16
Eindstand, omhoog.....	13	Reinigingsmiddelen	16
Eindstand, omlaag.....	13	Reparaties	4
Eerste gebruik	6	Rode knop	13
Eerste montage	7	Rugleuning	3, 8, 9, 15
Garantie.....	4	Smeren	16
Garantiebepalingen	22	Storing	5
Gebruik	6	Technische gegevens.....	19
Gebruiksaanwijzing	24	Toebehoren en reserveonderdelen	23
Geel lampje	12	Transport	6, 18
Gele knop	13	Typeplaatjes	24
Groen lampje.....	12	Uit de badkuip nemen.....	14
Handgreep.....	8	Uitpakken.....	6
Handbediening	3, 8, 12	Vakhandelaar	5
Hergebruik/verwerking	22	Veiligheid	4
Hefstang	4, 15	Veiligheidsvoorschriften.....	5
Hoofdsteun	11	Verklaring van de symbolen	24
Lage temperaturen	18	Vermogen van de volle accu	12
Lampje knippert langzaam geel	12	Zijflappen.....	10, 13
Lampje knippert snel rood.....	12	Zitplaat.....	3, 19
Lichamelijk gehandicapten	5	Zuignappen.....	6, 7, 13, 15, 23
Lift in auto opslaan	18		

Notities

Adres

D

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44

D - 88316 Isny/Allgäu

Tel. 075 62/97 24-0

Fax 075 62/97 24 25

Mail info@drivemedical.de

Web www.drivemedical.de

Vult u hier het adres van uw vakhandelaar in:

Art.-nr. 460900525 · Stand: 09/2011

© 2008 by Drive Medical GmbH & Co. KG
